



Ref. 21.105.1

## COMPOSICIÓN:

- De material plástico con goma.

## ALMACENAR:

- Proteger de la luz solar directa.

## APLICACIONES MÁS USUALES

-Obtención rápida de impresiones de pie de alta definición gracias a la placa dotada de caucho natural.  
-Las huellas y los datos del paciente se imprimen en las hojas de papel suministradas.

## INSTRUCCIONES DE USO:

El pedígrafo es un instrumento en forma de caja con dos tapas, una superior y otra inferior. Al abrirlo queda como un libro y en el medio tiene una lámina de componente elástico que a su vez presenta dos caras, una inferior y otra superior. La cara superior será por donde el paciente apoye el pie, mientras que la inferior estará impregnada de tinta bien esparcida uniformemente mediante un rodillo.

Debajo de esta cara impregnada de tinta colocaremos un papel blanco, bajaremos la lámina e indicaremos al paciente que apoye su pie sobre la lámina, para que así su huella quede marcada sobre el folio blanco. Al apoyar el pie, la superficie entintada choca con el fondo de la caja, y la huella plantar quedará registrada sobre el papel en blanco.

El pie se debe apoyar sobre la superficie uniformemente, de una vez y con una posición cómoda para que la huella se marque lo mejor posible.

Las zonas con más hiperpresión se marcarán con un color más oscuro, mientras que las de hipopresión se marcarán con un color más claro, o blanco.

1- Abra el libro en la posición indicada



2- Coloque una hoja del talonario por la parte trasera hacia arriba, donde se imprima la huella .



3- Impregne con tinta la parte izquierda y esparza con la ayuda del rodillo



4- Situar la pantalla de caucho en la parte derecha y apoyar el pie del paciente sobre ella.



Recuerde que puede utilizar el marcador de contornos para perfilar la silueta de la planta del pie y los puntos que interesen de la huella.



La superficie entintada de esta manera, choca con el fondo de la caja y la huella plantar queda registrada sobre el papel.

Recuerde que el pie debe apoyarse sobre la superficie uniformemente de una vez y con posición cómoda para que la huella marque lo mejor posible.

#### ADVERTENCIAS

- Uso exclusivo profesionales.

#### MATERIAL SUMINISTRADO

Pedígrafo, rodillo, marcador para contornos, tinta de sellar y talonario notas paciente.

\*Tenemos disponible también recambio de goma, tinta, talonario y el rodillo para el pedígrafo. (Consultar)